

## IDテストシリーズ 菌名検索用「IDテスト解析プロフィールソフトウェア」(Web版)

### ■ IDテストシリーズ

- 微量テスト法と数値分類法に基づいた簡易同定用キットです
  - ・反応の結果が明瞭な色で判定でき、正確な同定が可能
  - ・3項目ごとの配列でコード化しやすく、小型で積み重ねても安定
  - ・プレートは室温保存(30℃を越えない)で1年間安定

### ■ 菌名検索用「ID解析プロフィールソフトウェア」(Web版) について

<菌名検索方法を変更します。> (従来のCDのインストールから、インターネットブラウザ上での検索が可能となりました。)

※数値分類法や得られる同定菌名の精度に変更はありません。

<変更イメージ>



CD版でのサポートは2020年9月14日で終了し、以降アップデート等はWeb版で行います。



島津ダイアグノスティクス

ご送付



お客様の  
PCへインストール



**起動用URL** (弊社HP、コスモ会HPからもリンクします。)

**<https://kmk-ss.net/nsi/login.php>**

お客様  
(インターネット環境)


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


起動用USERID : 「iduser4d」 PASSWORD : 「pass2021」 (※)

専用Webサイトへ



ブラウザ上で菌名検索

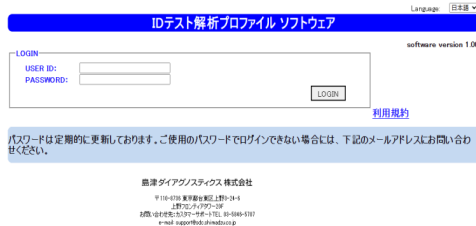

※管理用、メンテナンス用のID、PWと区別された、お客様共通の検索用です。

**MERIT**

- ①セキュリティ規制でソフトインストールができないお客様でも使用可能です。
- ②CDドライブのないPCでも使用可能です。
- ③最新のバージョンで検索可能で、お客様での入替操作が不要です。
- ④追加テストでの菌名絞り込みが可能です。
- ⑤タブレット端末でも使用可能です。

### ■ 対象製品

- ・製品コード : 06626 IDテスト EB-20 (ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌用)
- ・製品コード : 06673 IDテスト EB-9 (腸内細菌科用)
- ・製品コード : 06629 IDテスト NF-18 (ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌用)
- ・製品コード : 06637 N-IDテスト SP-18 (ブドウ球菌属用)
- ・製品コード : 06635 IDテスト HNラピッド (ヘモフィルス属・ナイセリア属およびその他類縁菌用)

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先 : カスタマーサポート担当

TEL. 03-5846-5707

E-mail : support@sd.c.shimadzu.co.jp

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト


<https://clinical-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>



# IDテストシリーズ 菌名検索用「IDテスト解析プロフィールソフトウェア」(Web版)

## ■ 画面イメージ

### ● 起動画面

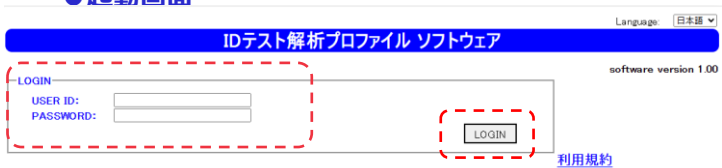


- ① USER ID、PASSWORDを入力
- ② LOGINをクリックしてメニュー画面へ

パスワードは定期的に更新しております。ご使用のパスワードでログインできない場合は、下記のメールアドレスにお問い合わせください。

島津ダイアグノスティクス 株式会社  
〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6  
上野フロンティアタワー20F  
お問い合わせ先: カスタマーサポート TEL: 03-5846-5707  
e-mail: support@sdcs.shimadzu.co.jp

### ● メニュー画面

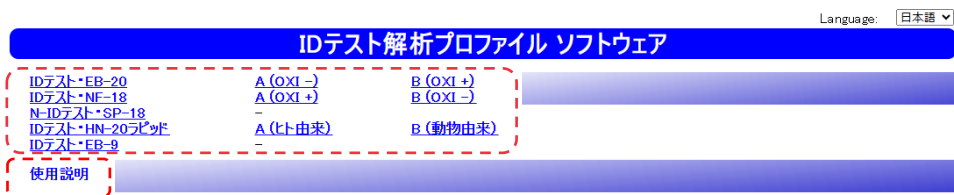

各キットの検索画面へ

本プログラムの説明書

島津ダイアグノスティクス 株式会社  
〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6  
上野フロンティアタワー20F  
お問い合わせ先: カスタマーサポート TEL: 03-5846-5707  
e-mail: support@sdcs.shimadzu.co.jp

### ● 検索画面 (N-IDテストSP-18例)



### ● 説明書 (PDF)



「Stap. delphini」, 「Stap. intermedius」の時、備考欄に「Stap. pseudintermediusの可能性がります。」と表記します。

詳細な使用方法は本説明書をご参照ください。

## ■ (参考: 従来のCD画面イメージ)

