

○ライセンスS4 日常保守点検チェックシート

年 月

施設名・部署

チェック項目\日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
培養温度の確認																
検体ラック受けの清掃																
サンプルカバーの清掃																
プレート供給部の清掃																
プレート廃却部の清掃																
使用済みチップ廃棄																
検体ラックの清掃																
PC再起動(推奨:1週間ごと)																
確認者																

備考欄

チェック項目\日付	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
培養温度の確認																
検体ラック受けの清掃																
サンプルカバーの清掃																
プレート供給部の清掃																
プレート廃却部の清掃																
使用済みチップ廃棄																
検体ラックの清掃																
PC再起動(推奨:1週間ごと)																
確認者																

- ※ エアフィルター清掃(3ヶ月)
- ※ Oリング交換(1年)
- ※ シリンジシール交換(1年)
- ※ 再起動(週1回) パソコンの不要なログの削除が行われます。測定が終了している状態で実施可能です。  
画面左下の『POWER』のボタンをタップします。電源をOFFにします。その後、検体ラック左下のボタンを押しライセンスS4を起動します。

備考欄