

# サプリメントRS

## \*\* —— 特 徴 ——

本品は、ライサス\*チューブに一定量加えることにより、*Streptococcus* 属や *Corynebacterium* 属、嫌気性菌を十分に発育させることができます。

## \*\* —— 本質〈組成〉 ——

### 〔ライサスチューブに本品を加えた後の成分濃度〕

ウマ血清	.....	3%
安定化剤	.....	0.006%

## \*\* —— 用法・用量〈操作法〉 ——

本品1バイアルに滅菌水1 mLを加え、軽く振とうして内容物を完全に溶解します。この溶液0.2 mLをライサス\*チューブに加え、2～3回軽く転倒混和して使用します。

## \*\* —— 使用上または取扱い上の注意 ——

### 1. 一般的な注意事項

- 1) 本品はライサス\*チューブMHBまたはライサス\*チューブブルセラブイオンに添加する試薬です。
- 2) 本品を添加するブイオンは、*Streptococcus*属と *Corynebacterium*属に対してはライサス\*チューブMHB、嫌気性菌に対してはライサス\*チューブブルセラブイオンです。
- 3) この添付文書をよく読み、記載された操作法に従って使用してください。
- 4) 本品は不純物等の混入により変質する恐れがあるので、汚染させないように十分注意してください。
- 5) 使用期限を過ぎた製品は品質の保証ができないので使用しないでください。
- 6) 検査結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等と併せて担当医師が総合的に判断してください。

### 2. 危険防止上の注意事項

- 1) 微生物の取扱いは常に感染の危険性があるので、取り扱いにあたっては熟練した技術者のもとにバイオハザード対策を実施したうえで使用してください。
- 2) 検体に接種した器具、試薬および試薬容器などは感染の危険があるものとして取り扱ってください。

### 3. 廃棄上の注意事項

使用後の培地、容器等は、オートクレーブ等で滅菌したのち、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等に区別して処理してください。

## —— 貯法・使用期限 ——

### 〔貯 法 〕

冷所（2～10℃）で保存してください。  
溶解後は冷所（2～10℃）で保存し7日間使用できます。

### 〔使用期限〕

製造後6カ月間。

## \*\* —— 包装単位 ——

サプリメントRS 1 mL用 × 5本 ..... 

Code 04194
------------

## \*\* —— 別売関連製品 ——

ライサス\*チューブMHB 12 mL × 50本 ..... 

Code 04190
------------

ライサス\*チューブブルセラブイオン 12 mL × 25本 ..... 

Code 04189
------------

## \*\* 製造販売元

**島津ダイアグノスティクス 株式会社**

\* 東京都台東区上野3-24-6 〒110-0005 TEL 03(5846)5611 (代)