

IDテストシリーズ 菌名検索用「IDテスト解析プロフィールソフトウェア」(Web版)

■ IDテストシリーズ

- 微量テスト法と数値分類法に基づいた簡易同定用キットです
 - ・ 反応の結果が明瞭な色で判定でき、正確な同定が可能
 - ・ 3項目ごとの配列でコード化しやすく、小型で積み重ねても安定
 - ・ プレートは室温保存（30℃を越えない）で1年間安定

■ 菌名検索用「ID解析プロフィールソフトウェア」(Web版)について

<菌名検索方法を変更します。> (従来のCDのインストールから、インターネットブラウザ上での検索が可能となりました。)

※数値分類法や得られる同定菌名の精度に変更はありません。

<変更イメージ>  CD版でのサポートは2020年9月14日で終了し、以降アップデート等はWeb版で行います。



起動用URL (弊社HP、コスモ会HPからもリンクします。)

<https://kmk-ss.net/nsi/login.php>


お客様
(インターネット環境)



起動用USERID : 「iduser4d」 PASSWORD : 「pass2021」 (※)

専用Webサイトへ

ブラウザ上で菌名検索

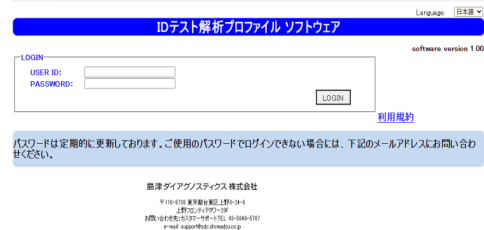

※管理用、メンテナンス用のID、PWと区別された、お客様共通の検索用です。

MERIT

- ①セキュリティ規制でソフトインストールができないお客様でも使用可能です。
- ②CDドライブのないPCでも使用可能です。
- ③最新のバージョンで検索可能で、お客様での入替操作が不要です。
- ④追加テストでの菌名絞り込みが可能です。
- ⑤タブレット端末でも使用可能です。

■ 対象製品

- ・ 製品コード : 06626 IDテスト EB-20 (ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌用)
- ・ 製品コード : 06629 IDテスト NF-18 (ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌用)
- ・ 製品コード : 06637 N-IDテスト SP-18 (ブドウ球菌属用)
- ・ 製品コード : 06635 IDテスト HNラピッド (ヘモフィルス属・ナイセリア属およびその他類縁菌用)

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先 : カスタマーサポート担当

TEL. 03-5846-5707

E-mail : support@sd.c.shimadzu.co.jp

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

<https://clinical-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>



IDテストシリーズ 菌名検索用「IDテスト解析プロフィールソフトウェア」(Web版)

■ 画面イメージ

● 起動画面

Language: 日本語

IDテスト解析プロフィール ソフトウェア

software version 1.00

LOGIN

USER ID:

PASSWORD:

LOGIN

利用規約

パスワードは定期的に更新しております。ご使用のパスワードでログインできない場合には、下記のメールアドレスにお問い合わせください。

島津ダイアグノスティクス 株式会社
〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6
上野フロントタワー20F
お問い合わせ先: カスタマーサポート TEL: 03-5846-5707
e-mail: support@sdcs.shimadzu.co.jp

● メニュー画面

Language: 日本語

IDテスト解析プロフィール ソフトウェア

software version 1.00

IDテスト・EB-20 A (OXI-) B (OXI+)

IDテスト・NF-18 A (OXI+) B (OXI-)

N-IDテスト・SP-18 -

IDテスト・HN-20ビッド A (ヒト由来) B (動物由来)

IDテスト・EB-9 -

使用説明

各キットの検索画面へ

本プログラムの説明書

島津ダイアグノスティクス 株式会社
〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6
上野フロントタワー20F
お問い合わせ先: カスタマーサポート TEL: 03-5846-5707
e-mail: support@sdcs.shimadzu.co.jp

● 検索画面 (N-IDテストSP-18例)

N-IDテスト・SP-18解析プロフィール

software version 1.00

情報入力

No:

ファイル:

バージョン:

date: 2020/09/10

MAS LAG TRE MAL SIKO RAFF X-A TUR NAG RID MAN FRU PHO V-P NIT URE ADH A-CL

7 3 6 7 7 7

検索 リセット 追加テスト 元の結果に戻る 結果保存 ホーム画面に戻る ログアウト

同定結果

菌名	信頼度	絶対確率	相対確率	異常項目	追加テスト	備考
Staph. aureus	★★	0.059021	>99%			Staph. aureus/aureus と同義です。

コメント入力

使用説明 試薬添付文書 判定色表

「Staph. delphini」,「Staph. intermedius」の時、備考欄に「Staph. pseudintermediusの可能性あります。」と表記します。

● 説明書 (PDF)

IDテスト解析プロフィールソフトウェアの説明

ソフト共通仕様説明 software version 1.00

■ LOGIN画面

IDテスト解析プロフィール ソフトウェア

software version 1.00

LOGIN

USER ID:

PASSWORD:

LOGIN

利用規約

パスワードは定期的に更新しております。ご使用のパスワードでログインできない場合は、下記メールアドレスにお問い合わせください。

弊社が付与した所定の USER ID、PASSWORD を入力し、LOGIN にカーソルを合わせてクリックします。

・USER ID (ユーザー ID)
半角 12 桁以内です。未登録ユーザーID 入力時、「ユーザー ID が未登録です。」のメッセージが表示されます。期間切れのユーザーID 入力時、「有効期限切れが検出されています。」のメッセージが表示されます。

詳細な使用方法是本説明書をご参照ください。

■ (参考: 従来のCD版画面イメージ)



IDテストコード検索

software version 1.00

情報入力

No:

ファイル:

バージョン:

date: 2020/09/10

MAS LAG TRE MAL SIKO RAFF X-A TUR NAG RID MAN FRU PHO V-P NIT URE ADH A-CL

7 3 6 7 7 7

検索 リセット 追加テスト 元の結果に戻る 結果保存 ホーム画面に戻る ログアウト

同定結果

菌名	信頼度	絶対確率	相対確率	異常項目	追加テスト	備考
Staph. aureus	★★	0.059021	>99%			Staph. aureus/aureus と同義です。

コメント入力

使用説明 試薬添付文書 判定色表