


アキュレート™ 羊血液寒天培地

アキュレート™ 羊血液寒天培地HEM

肺炎球菌の集落が大きく α 溶血が明瞭な羊血液寒天培地です。
HEMは、肺炎球菌の発育を強化し、溶血性をさらに明瞭にした培地です。

特長

- 羊血液寒天培地は、肺炎球菌 (*Streptococcus pneumoniae*) の集落が大きく α 溶血も明瞭に出現します。また、A群レンサ球菌 (*Streptococcus pyogenes*) は明瞭な β 溶血を示します。
- 羊血液寒天培地HEMは、さらに肺炎球菌 (*Streptococcus pneumoniae*) の発育を強化するとともに、肺炎球菌の α 溶血性やA群レンサ球菌 (*Streptococcus pyogenes*) の β 溶血性を明瞭にした培地です。

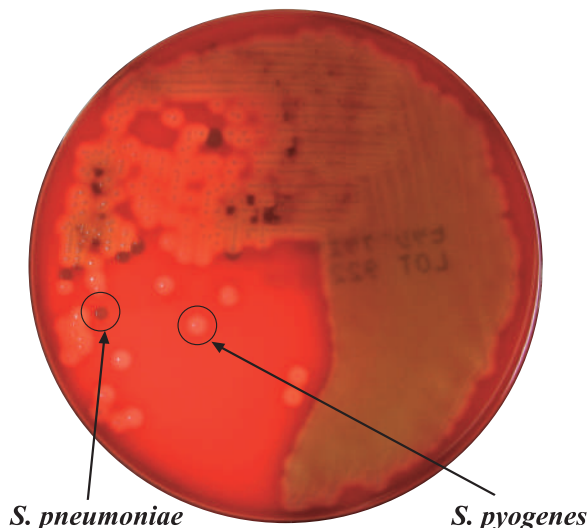

発育例

- α 溶血：集落の周囲が緑変します。
- β 溶血：集落の周囲は、明瞭な境界を持つ透明な溶血環で囲まれます。
- γ 溶血：非溶血。集落周囲に溶血環を形成しません。

使用上の注意

- 本培地はそのまま使用することは可能ですが、培地表面が凝固水で湿っているときには乾燥させてからご使用下さい。

培地の使用法

- *Streptococcus* 属は、5~10%炭酸ガス培養を行うと通常の好気培養よりも良好な発育を示します。

	羊血液寒天培地	羊血液寒天培地HEM
<i>S. pyogenes</i>		
<i>S. pneumoniae</i>		

品名	製品コード	包装	希望納入価格(円)	使用期限
アキュレート™ 羊血液寒天培地	51001	10枚	1,800	2.5ヵ月
	50001	100枚	18,000	
アキュレート™ 羊血液寒天培地HEM	51062	10枚	1,800	2.5ヵ月
	50053	100枚	18,000	

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL : 03 (5846) 5707

✉ support@cdc.shimadzu.co.jp

URL : https://corp.cdc.shimadzu.co.jp/

4~10℃に保存 (禁凍結)

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

<https://clinical-diagnostics.biz.cdc.shimadzu.co.jp/>



アキュレート™ **羊血液寒天培地EX**

アキュレート™ **羊血液寒天培地NA**

肺炎球菌の集落が大きく α 溶血が明瞭な羊血液寒天培地です。
EX及びNAには、ヘモフィルス属が発育します。

特長

- 羊血液寒天培地EXおよびNAは、発育因子を添加することによって、通常の羊血液寒天培地には発育しない *Haemophilus* 属も発育させます。

発育例


- α 溶血：集落の周囲が緑変します。
- β 溶血：集落の周囲は、明瞭な境界を持つ透明な溶血環で囲まれます。
- γ 溶血：非溶血。集落周囲に溶血環を形成しません。
- 羊血液寒天培地EXおよびNAでは、*Haemophilus* 属が発育します。

使用上の注意

- 本培地はそのまま使用することは可能ですが、培地表面が凝固水で湿っているときには乾燥させてからご使用下さい。

培地の使用法

- *Streptococcus* 属は、5~10%炭酸ガス培養を行うと通常の好気培養よりも良好な発育を示します。
- *Haemophilus* 属の培養は、5~10%炭酸ガス培養を行って下さい。

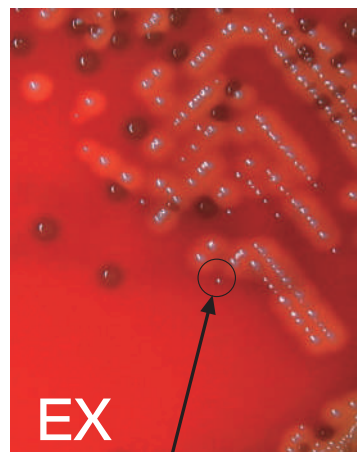

H. influenzae



H. influenzae

品名	製品コード	包装	希望納入価格(円)	使用期限
アキュレート™ 羊血液寒天培地EX	50002	100枚	25,000	2ヵ月
アキュレート™ 羊血液寒天培地NA	51003	10枚	2,000	2.5ヵ月

製造販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当

TEL : 03 (5846) 5707

✉ support@cdc.shimadzu.co.jp

URL : <https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/>

4~10℃に保存（禁凍結）

臨床診断薬分野 医療関係者向けサイト

<https://clinical-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/>

